

ジェイ マルチバッグ

これは便利！ J-MultiBag の使い方

JINRIKIシリーズの収納はもちろん
JINRIKIハンスフリー牽引が可能に
なりました。

車いすのハンドルにかけたり、リュックに
したり、お出かけの必需品です！



JINRIKI® J-MultiBag



JINRIKIQUICKの収納バッグとして
フラップで固定でき、ポケットに
ジョイントを保管できます。



手提げバッグとしてはもちろん
ショルダーバッグにして楽に
持ち運びが可能です。



JINRIKIQUICKを使わない時は
車いすのハンドルにかけて
お出かけできます。




リュックにして、フックにバーを
掛ければハンスフリー牽引が可能
なので、腕の疲れがありません。



①JINRIKIQUICKを取り出した状態のJ-MultiBagをたたんで、2か所のバックルをとめます。

②バッグを裏返して3か所のファスナーを開けてベルトとリングを取り出します。

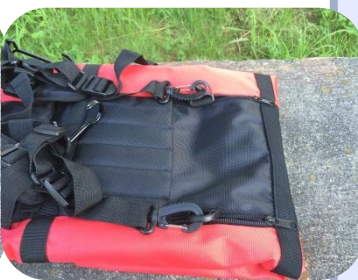

③取り出したベルトの先端のロックフックとリングを確実に取り付けます。



④リュックが完成したらベルトの長さを調節して、金属フックにバーをセットして完成です。



注意・禁止事項

- ・緊急時などやむを得ない場合を除き、前後二人以上で介助してください。
- ・転倒の恐れがありますので、安全なスピードを維持してください。
- ・急な傾斜地では転倒の恐れがあります。
- ・予想外のトラブルを想定し、いつでもバーを掴める様に手を添えておいてください。
- ・異常がある場合は使用しないでください。
- ・破損、ゆるみなどが無い、使用前に必ず点検してください。
- ・破損、故障、ケガ、事故の原因になりますので改造・分解はしないでください。
- ・本製品の故障に起因する付随的な損害については責任を負いかねます。

For More Information

株式会社 JINRIKI

E-MAIL: contact@jinriki.asia

〒399-4601 長野県上伊那郡箕輪町中箕輪1536
TEL: 050-5835-1000(営業部) FAX: 0265-98-8921

URL: <http://www.jinriki.asia/>

JINRIKI